

## MeniLab

Til profesjonelt bruk for rengjøring av RGP linser

### Bruksanvisning

1. Vask hendene godt før håndtering av linsen.  
Gni linsen forsiktig i 20 sek. med Meni Care Pure. Skyll med Meni Care Pure.
2. Fyll linseglasset med MeniLab og la linsen ligge i MeniLab i 5 minutter.
3. Ta lokket forsiktig av uten å søle med væsken. **Skyll linsen godt** i 15 sekunder med Meni Care Pure mens den sitter i klypen i lokket.
4. Linseglasset tømmes for MeniLab og skylles med Meni Care Pure.
5. Linsen oppbevares i Meni Care Pure. Bytt ut linsevæsken hver 4. uke når prøvelinsene ikke er i bruk i mellomtiden.
6. Før linsen tas i bruk, skylles den med MeniCare Pure.

**ADVARSEL:** MeniLab må ikke komme i kontakt med øynene.

Ved uhell: skyll øynene grundig med vann og kontakt raskt din kontaktlinsetilpasser eller øyelege.

MeniLab må ikke svelges. Oppbevares utilgjengelig for barn.

### Forholdsregler

- Ikke oppbevar linsen lenger enn 60 min i MeniLab. Fargen på linsene kan blekes, men utover dette påvirkes ikke kvaliteten på linsene.
- **Viktig: ikke svelg. Unngå kontakt med hud og søl ikke på klær (kan bleke).**
- Oppbevares i romtemperatur (15-25°C).
- Brukes innen 3 mnd etter åpning.
- MeniLab utgått på dato skal ikke brukes.
- Bruk aldri vann fra springen til å skylle linsene med.

### Kontraindikasjoner

- Brukes ikke sammen med myke kontaktlinser.
- Brukes ikke ved allergi overfor noen av komponentene.

**Innhold** Aktiv klor qs 0,5%  
Destillert vann qs100%